

## NOUVEAUX COFFRETS DE PRELEVEMENT



Ce qui change :



- ▶ Deux tubes gel à bouchon jaune à la place du tube rouge :
  - le grand tube remplace le tube rouge
  - le petit tube doit être prélevé en plus si possible
  
- ▶ Deux tubes mauves EDTA à votre disposition :
  - un tube pour NFS - Plaquettes - VS
  - un deuxième tube pour HbA1c - Groupe Sanguin - RAI - BNP - HLAB27 - dosage ciclosporine, tacrolimus...
  
- ▶ Après le prélèvement, les coffrets sont placés dans le sens des flèches (à la verticale) jusqu'au passage du laboratoire: la position « debout » des tubes permet de limiter l'hémolyse.

Bonne utilisation à tous !